



# Всеки момент е от значение

Грижете се за бебета в динамична област за грижи с високорискови пациенти и много източници на разсейване. Съчетаването на безопасни дизайни с обучение на потребителя ще подпомогне целите Ви, свързани с предотвратяване на падания на новороденото.

- Има приблизително 600 – 1600 падания на новородени на година в САЩ по време на родилните мъки и раждането, след раждането и в областите за грижа за новороденото, включително от ръцете на полагащите грижа лица и родителите, легла за възрастни, кошарки, кушетки, подгриващи модули, кувьози, кантари, столове и т.н.<sup>1</sup>
- Паданията може да доведат до нараняване
- Случаите, при които почти се стига до падане, и самите падания могат да бъдат предотвратени
- Непрекъснатата бдителност и осведоменост са задължителни за спомагане на намаляване на риска от падания<sup>2</sup>

Уверете се, че всеки, който взаимодейства с ключалките на допълнителните отвори или вратите, е информиран относно правилната употреба и знае следното:

- Как да установи дали страничните панели на леглото или допълнителните отвори са заключени
- Как и кога да отваря допълнителните отвори и страничните панели на леглото
- Как да реагира, ако не са заключени или затворени
- Да не се отвръща от отворени странични панели на леглото или допълнителни отвори
- Как да управлява прехвърляния на пациенти
- Случаите, при които почти се стига до падане, които вероятно са резултат от активни бебета или от разсейвания на полагащите грижа лица



Сканирайте този QR код, за да изгледате кратък 4-минутен видеоклип за отварянето и затварянето на вратите на допълнителните отвори и за спускането/вдигането на стените


gehealthcare.com

Трябва да дръпвате **вратата на допълнителния отвор** всеки път, когато страничният панел на леглото или допълнителният отвор бъде затварян, за да се уверите, че вратата на допълнителния отвор е заключена.



Трябва да дръпвате **страничния панел на леглото** всеки път, когато панелът бъде затварян, за да се уверите, че панелът е заключен.

Червеният палец показва, че ключалката **не е задействана**.

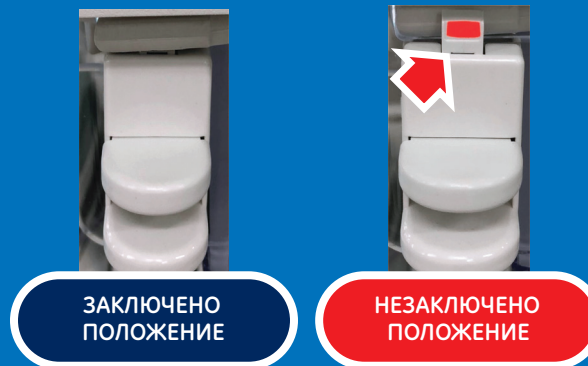

Трябва да дръпвате **страничния панел на леглото** всеки път, когато панелът бъде затварян, за да се уверите, че панелът е заключен.

Червеният палец показва, че ключалката **не е задействана**.



1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants:

Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>