



# Øjeblikke er vigtige

Du tager dig af spædbørn i et plejemiljø med højt tempo, højrisikopatienter og masser af distraherende forhold. Med en kombination af sikkert design og brugeruddannelse understøtter du målet om at forebygge, at nyfødte falder ned.

- Man skønner, at 600-1600 nyfødte i USA falder ned – i svangre- og fødselsafsnit, umiddelbart eller kort tid efter fødslen. Det gælder fra plejepersoners og forældres arme samt fra voksensenge, vugger, varmemadrasser, kuvøser, vægte, stole osv.<sup>1</sup>
- Fald kan medføre personskade
- Nær-ved-ulykker og fald kan forebygges
- Der kræves løbende opmærksomhed og uddannelse for at reducere risikoen for fald<sup>2</sup>

Sørg for, at alle, der bruger luger eller dørlåse, er uddannet i korrekt brug og er opmærksomme på følgende:

- Hvordan man ser, om sengepanelerne og lugerne er låst
- Hvordan og hvornår luger og sengepaneler skal åbnes
- Hvordan man reagerer, hvis de ikke er låst eller lukket
- At man ikke vender ryggen til åbne sengepaneler eller luger
- Hvordan man håndterer forflytning af patienter
- Nær-ved-ulykker, som muligvis skyldes aktive spædbørn, eller at plejepersonalet bliver forstyrret



Scan denne QR-kode for at se en kort 4-minutters video om åbning og lukning af lugedøre og sænkning/hævning af vægge

gehealthcare.com

Træk i **lugedøren**, hver gang sengepanelet eller lugen lukkes, for at sikre, at lugedøren er låst.




Træk i **sengepanelet**, hver gang panelet lukkes, for at sikre, at panelet er låst.

Den røde klap viser, at låsen **ikke er i indgreb**.



Træk i **sengepanelet**, hver gang panelet lukkes, for at sikre, at panelet er låst.

Den røde klap viser, at låsen **ikke er i indgreb**.

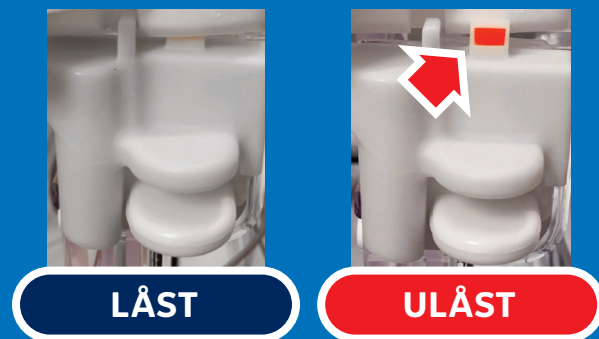

<sup>1</sup> Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

<sup>2</sup> <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>