



# Les moments comptent

Vous prenez soin de nourrissons dans une zone de soins à rythme soutenu, avec des patients à haut risque et beaucoup de distractions. L'association de conceptions sûres et d'une formation de l'utilisateur vous permettra d'atteindre vos objectifs de prévention des chutes du nouveau-né.

- Aux États-Unis, on estime qu'il y a entre 600 et 1 600 chutes de nouveau-nés par an pendant le travail et l'accouchement, le post-partum et les soins aux nouveau-nés, notamment des bras des soignants et des parents, des lits pour adultes, des berceaux, des lits pour enfants, des couveuses, des balances, des chaises, etc.<sup>1</sup>
- Les chutes peuvent entraîner des blessures
- Les quasi-accidents et les chutes peuvent être évités
- Une sensibilisation et une formation continues sont nécessaires pour permettre de réduire le risque de chutes<sup>2</sup>

Assurez-vous que toute personne qui interagit avec les hublots ou les loquets des portes est informée de l'utilisation correcte et qu'elle connaît les éléments suivants :

- Comment déterminer si les panneaux latéraux du lit et les hublots sont fixés
- Comment et quand ouvrir les hublots et les panneaux latéraux du lit
- Comment réagir s'ils ne sont pas fixés ou fermés
- Ne pas s'éloigner des panneaux latéraux du lit ou des hublots ouverts
- Comment gérer les transferts de patients
- Quasi-accidents pouvant être le résultat de l'agitation des nourrissons ou de la distraction des soignants



Scannez ce code QR pour regarder une courte vidéo de 4 minutes sur l'ouverture et la fermeture des portes des hublots et l'abaissement/le relèvement des parois

gehealthcare.com

Vous devez tirer sur la **porte du hublot** chaque fois que le panneau latéral du lit ou le hublot est fermé pour vous assurer que la porte du hublot est fixée.



Vous devez tirer sur le **panneau latéral du lit** chaque fois qu'il est fermé pour vous assurer qu'il est fixé.

La languette rouge indique que le loquet n'est **pas enclenché**.



FIXÉ



NON FIXÉ

Vous devez tirer sur le **panneau latéral du lit** chaque fois qu'il est fermé pour vous assurer qu'il est fixé.

La languette rouge indique que le loquet n'est **pas enclenché**.



FIXÉ



NON FIXÉ

1 Monson S.A., et al. (2008). Chutes à l'hôpital de nouveau-nés : Données provenant d'un système de santé multihospitalier. Pediatrics 122:e277-e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>