



Trenuci su važni

Brinete se za dojenčad u području skrbi brzog tempa s visokorizičnim pacijentima i mnogo ometanja. Kombiniranje sigurnog dizajna s edukacijom korisnika pomoći će vam da spriječite padove novorođenčadi.

- Procjenjuje se da u SAD-u godišnje oko 600 – 1600 novorođenčadi padne tijekom poroda, nakon poroda i u područjima skrbi za novorođenčad uključujući iz ruku njegovatelja i roditelja, kreveta za odrasle, kolijevki, grijača, inkubatora, vaga, stolica itd.¹
- Padovi mogu rezultirati ozljedom
- Izbjegnuti padovi i padovi mogu se spriječiti
- Kako bi se spriječio rizik od padova, potrebna je stalna svjesnost i edukacija²

Pobrinete se da su svi koji rukuju otvorima ili zasunima za vrata educirani o pravilnoj upotrebi i svjesni sljedećeg:

- kako utvrditi jesu li ploče uz krevet i otvori zakopčani
- kako i kada otvoriti otvore i ploče uz krevet
- kako reagirati ako nisu zakopčani ili zatvoreni
- ne udaljavati se od otvorenih ploča uz krevet ili otvora
- kako upravljati premještanjem pacijenata
- izbjegnuti padovi koji mogu biti rezultat aktivnog novorođenčeta ili ometenog njegovatelja



Skenirajte ovaj QR kod kako biste pogledali kratki 4-minutni videozapis o otvaranju i zatvaranju otvora vrata i spuštanju/podizanju stranica

gehealthcare.com

Vrata otvora morate povući svaki put kad se ploča uz krevet ili otvor zatvori da biste bili sigurni da su vrata otvora zakopčana.



Ploču uz krevet morate povući svaki put kad se ploča zatvori da biste bili sigurni da je ploča zakopčana.

Crveni jezičak pokazuje da zasun **nije zakopčan**.



ZAKOPČANO



NEZAKOPČANO

Ploču uz krevet morate povući svaki put kad se ploča zatvori da biste bili sigurni da je ploča zakopčana.

Crveni jezičak pokazuje da zasun **nije zakopčan**.



ZAKOPČANO



NEZAKOPČANO

¹ Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

² <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>