



Momen berharga

Anda merawat bayi dalam area perawatan yang menuntut semuanya serbacepat dengan pasien berisiko tinggi dan banyak gangguan. Perpaduan desain aman dan pelatihan pengguna akan membantu Anda mencegah kejadian terjatuhnya bayi baru lahir.

- Diperkirakan ada 600-1600 kejadian terjatuhnya bayi baru lahir setiap tahun di AS selama seluruh proses persalinan dan kelahiran, pasca-melahirkan, dan dalam area perawatan bayi baru lahir. Kejadian ini meliputi terjatuhnya bayi baru lahir dari lengan perawat dan orang tua, tempat tidur orang dewasa, boks bayi, tempat tidur bayi, penghangat, inkubator, timbangan, kursi, dll.¹
- Jatuh dapat mengakibatkan cedera
- Kejadian nyaris terjatuh dan terjatuhnya bayi dapat dicegah
- Diperlukan kewawasan diri dan pembelajaran berkelanjutan untuk membantu mengurangi risiko jatuh²

Pastikan siapa pun yang menggunakan lubang angin atau selot pintu telah menerima pembelajaran tentang cara penggunaan yang benar dan mengetahui hal-hal berikut:

- Cara mengetahui terkunci tidaknya panel samping tempat tidur dan lubang angin
- Cara dan saat yang tepat untuk membuka lubang angin dan panel samping tempat tidur
- Hal yang harus dilakukan jika lubang angin tidak terkunci atau tidak tertutup
- Bahwa mereka tidak boleh memalingkan pandangan dari panel samping tempat tidur atau lubang angin yang terbuka
- Cara memindahkan pasien
- Kejadian nyaris terjatuh yang kemungkinan disebabkan oleh bayi yang aktif bergerak atau perawat yang fokusnya teralihkan



Pindai kode QR ini untuk menonton video pendek berdurasi 4 menit tentang cara membuka dan menutup pintu lubang angin dan menurunkan/menaikkan dinding

gehealthcare.com

Anda harus menarik **pintu lubang angin** setiap kali panel samping tempat tidur atau lubang angin ditutup untuk memastikan pintu lubang angin sudah terkunci.



Anda harus menarik **panel samping tempat tidur** setiap kali panel ditutup untuk memastikan panel sudah terkunci. Tab merah menunjukkan bahwa selot **belum terkunci**.



Anda harus menarik **panel samping tempat tidur** setiap kali panel ditutup untuk memastikan panel sudah terkunci. Tab merah menunjukkan bahwa selot **belum terkunci**.



1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. *Pediatrics* 122:e277-e280
 2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>