



Øyeblikk teller

Du har omsorg for spedbarn på en hektisk avdeling med høyrisikopasienter og mange distraksjoner. Å kombinere sikre design med brukeropplæring vil støtte målene dine for å forhindre fall hos nyfødte.

- Det skjer anslagsvis 600–1600 fall hos nyfødte per år i USA ved fødsel, etter fødsel, og på nyfødtavdelinger, inkludert fra armene til omsorgspersoner og foreldre, fra voksensenger, barnesenger, termosenger, kuvøser, vekter, stoler, osv.¹
- Fall kan føre til skader.
- Nestenuhell og fall kan forebygges.
- Det er nødvendig med kontinuerlig oppmerksomhet og opplæring for å bidra til å redusere risikoen for fall².

Sørg for at alle som samhandler med luker eller låser, er opplært i riktig bruk, og er klar over følgende:

- Hvordan man ser om sengepanelene og lukene er låst
- Hvordan og når lukene og sengepanelene skal åpnes
- Hva som skal gjøres hvis de ikke er låst eller lukket
- At man ikke skal snu seg bort fra åpne sengepaneler eller luker
- Hvordan man overfører pasienter
- Nestenuhell som kan være forårsaket av aktive spedbarn eller at omsorgspersonen er distraheret



Skann denne QR-koden for å se en kort video på 4 minutter om hvordan du åpner og lukker lukene og senker/hever veggene.

gehealthcare.com

Du må dra i **luken** hver gang sengepanelet eller luken lukkes, for å sikre at luken er låst.



Du må dra i **sengepanelet** hver gang panelet lukkes, for å sikre at sengepanelet er låst.

Det røde merket viser at låsen **ikke er låst**.



LÅST



IKKE LÅST

Du må dra i **sengepanelet** hver gang panelet lukkes, for å sikre at sengepanelet er låst.

Det røde merket viser at låsen **ikke er låst**.



LÅST



IKKE LÅST

¹ Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

² <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>