



Momentele contează

Îngrijiți sugari într-o zonă de îngrijire cu ritm alert, unde se află pacienți cu risc ridicat și multe elemente care vă pot distra atenția. Combinarea unor designuri sigure cu instruirea utilizatorilor, va contribui la atingerea obiectivelor dvs. de prevenire a căderilor nou-născuților.

- Se estimează că în SUA se înregistrează anual între 600 și 1600 de căderi ale nou-născuților în timpul travaliului și al nașterii, în post-partum și în zonele de îngrijire a nou-născuților, inclusiv din brațele îngrijitorilor și ale părinților, din paturile pentru adulți, pătuțuri pentru copii, încălzitoare, incubatoare, cântare, scaune etc.¹
- Căderile pot duce la rănire
- Accidentele potențiale și căderile pot fi prevenite
- Este necesară o conștientizare și o educație continuă pentru a contribui la reducerea riscului de cădere²

Asigurați-vă că orice persoană care interacționează cu orificiile sau dispozitivele de blocare a ușilor este instruită cu privire la utilizarea corectă a acestora și cunoaște următoarele:

- cum să identificați dacă panourile patului și orificiile sunt încuiate
- cum și când se deschid orificiile și panourile de la marginea patului
- cum să reacționați în cazul în care nu sunt blocate sau închise
- să nu vă îndepărtați de panourile patului sau de orificiile deschise
- cum să gestionați transferurile pacienților
- accidentele potențiale care pot fi rezultatul unor sugari activi sau al distragerii atenției îngrijitorilor



Scanați acest cod QR pentru a urmări un scurt videoclip de 4 minute despre deschiderea și închiderea ușilor orificiului și despre coborârea/ridicarea pereților

gehealthcare.com

Trebuie să trageți de **ușa orificiului** de fiecare dată când închideți panoul patului sau orificiul, pentru a vă asigura că ușa orificiului este blocată.



Trebuie să trageți de **panoul patului** de fiecare dată când închideți panoul, pentru a vă asigura că panoul este blocat.

Lamela roșie indică faptul că mecanismul de blocare **nu este cuplat**.



BLOCAT



DEBLOCAT

Trebuie să trageți de **panoul patului** de fiecare dată când închideți panoul, pentru a vă asigura că panoul este blocat.

Lamela roșie indică faptul că mecanismul de blocare **nu este cuplat**.



BLOCAT



DEBLOCAT

¹ Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

² <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>