



Важна каждая деталь

Уход за новорожденными отличается динамичностью, сопряжен с высокими рисками для здоровья пациентов и сопровождается отвлекающими факторами. Элементы конструкции, обеспечивающие безопасность, и надлежащий уровень знания правил эксплуатации позволит избежать падения новорожденного.

- Согласно оценкам, в США ежегодно происходит от 600 до 1600 падений новорожденных в родовой и послеродовой палате и в отделении терапии. Сюда относятся случаи падения новорожденных из рук лиц, осуществляющих уход, и родителей, а также случаи падения из инкубаторов и обогревающих систем, с кроватей для взрослых, детских кроваток, медицинских кроватей, весов, кресел и т. п.¹
- Падение может привести к травме
- Потенциально опасные ситуации и падения можно предотвратить
- Для снижения риска падения новорожденных требуется постоянное информирование и обучение персонала²

Все лица, использующие защелки окошек и панелей, должны быть ознакомлены с правилами эксплуатации и следующей информацией:

- как определить, зафиксированы ли прикроватные панели и окошки;
- как и когда можно открывать окошки и прикроватные панели;
- действия в случае, если окошки и прикроватные панели не зафиксированы или не закрыты;
- запрет отворачиваться от устройства, если открыты прикроватные панели или окошки;
- правила транспортировки пациента;
- перечень потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть в результате активного движения новорожденного или факторов, отвлекающих персонал.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы посмотреть 4-минутное видео с инструкциями по открытию и закрытию окошек и опусканию и подъему стенок


gehealthcare.com

Каждый раз после закрытия панели или окошка кроватки необходимо потянуть **дверцу окошка** на себя, чтобы убедиться, что она зафиксирована.




Каждый раз после закрытия **прикроватной панели** необходимо потянуть ее на себя, чтобы убедиться, что она зафиксирована.

Красная метка указывает на то, что защелка **не зафиксирована**.

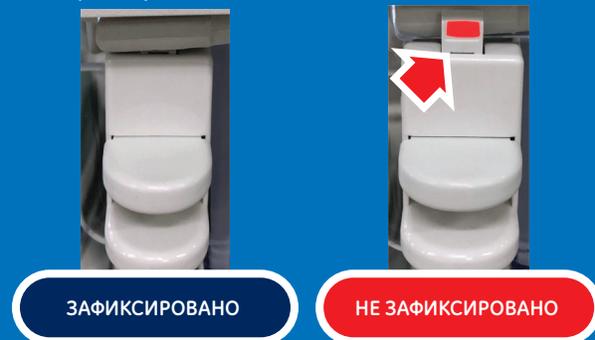

Каждый раз после закрытия **прикроватной панели** необходимо потянуть ее на себя, чтобы убедиться, что она зафиксирована.

Красная метка указывает на то, что защелка **не зафиксирована**.

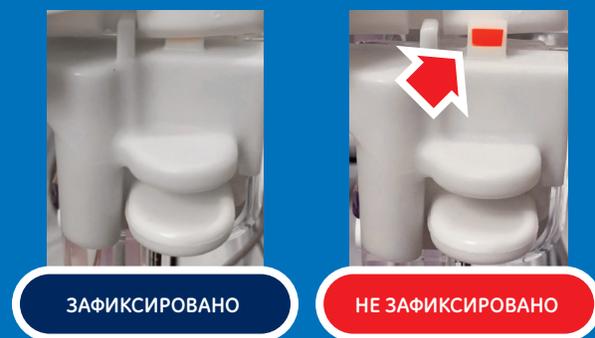

1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants:

Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>