



Važni su trenuci

Kao pružalac nege bebama radite u dinamičnoj sredini sa visokorizičnim pacijentima i suočavate se sa dosta situacija koje odvlače pažnju. Udruživanje bezbednih rešenja i obuke korisnika ide u prilog vašim ciljevima da sprečite pad novorođenčadi.

- Procenjuje se da se u SAD godišnje dogodi 600–1600 padova novorođenčadi na odeljenjima za pretporođajno-porođajnu, postporođajnu i neonatalnu negu, uključujući ispadanja iz naručja negovatelja i roditelja, kreveta za odrasle, kolevki, krevetaca, grejača, inkubatora, vaga, stolica itd.¹
- Padovi mogu dovesti do povreda
- Umalo izbegnuti i potencijalni padovi se mogu sprečiti
- Da bi se smanjio rizik od padova, potrebna je stalna svest o problemu i obuka²

Postarajte se da svako ko rukuje oknima i bravicama na vratancima bude obučan o njihovoj pravilnoj upotrebi i da ima u vidu sledeće:

- Kako utvrditi da li su table ležaja i okna zabravljani
- Kako i kada otvarati okna i table ležaja
- Kako postupiti ako nisu zabravljani ili zatvoreni
- Da se ne odmiče od otvorenih tabli ležaja odnosno okana
- Kako regulisati premeštaj pacijenata
- Umalo izbegnute padove koji su najverovatnije posledica aktivnih beba ili situacija koje negovatelju odvlače pažnju



Skenirajte ovaj QR kôd da biste odgledali kratak 4-minutni video o otvaranju i zatvaranju vratanca okana i spuštanju/podizanju tabli

gehealthcare.com

Kad god zatvarate tablu ležaja ili okno, obavezno povucite **vratanca okna** da biste proverili da li su zabravljena.



Kad god zatvarate **tablu ležaja**, obavezno je povucite da biste proverili da li je zabravljena.

Crveni jezičak označava da bravica **nije aktivirana**.



Kad god zatvarate **tablu ležaja**, obavezno je povucite da biste proverili da li je zabravljena.

Crveni jezičak označava da bravica **nije aktivirana**.



1 Monson S. A. et al. (2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277–e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>