



Her an önemlidir

Bebeklerle, yüksek riskli hastaların ve çok sayıda dikkat dağırtıcı kaynağın bulunduğu hızlı bir bakım alanında ilgileniyorsunuz. Güvenli tasarımları kullanıcılara yönelik eğitimlerle bir araya getirerek yenidoğanlarda görülen düşme vakalarını önleme hedeflerinizi destekleyebilirsiniz.

- ABD'de doğum sürecinde, doğum anında, doğum sonrasında ve sağlık çalışanları ile ebeveynlerin kolları, yetişkin yatakları, beşikler, bebek karyoları, ısıtıcılar, kuvözler, tartılar, sandalyeler vb. gibi yenidoğan bakım alanlarında görülen yenidoğan düşme vakalarının sayısının yılda 600-1600 olduğu düşünülmektedir.¹
- Düşmeler yaralanmaya neden olabilir
- Ramak kala olayların ve düşmelerin önüne geçilebilir
- Düşme riskini azaltmaya yardımcı olmak için sürekli farkındalık ve eğitim gereklidir²

Kuvöz pencerelerine veya kapak mandallarına temas eden herkesin doğru kullanım konusunda gerekli eğitimi aldığından ve aşağıdakiler konusunda farkındalık kazandığından emin olun:

- Hasta başı panelleri ve kuvöz pencereleri mandallarının yerine oturup oturmadığını belirleme
- Kuvöz pencerelerini ve hasta başı panellerini doğru açma yöntemi ve zamanı
- Mandallanmamış veya kapatılmamış kapakları ele alma
- Hasta başı panellerini veya kuvöz pencerelerini açık bırakıp gitmeme
- Hasta taşıma işlemlerini yönetme
- Muhtemelen hareketli bebekler veya dikkati dağılan sağlık çalışanları nedeniyle meydana gelen ramak kala olaylar



Bu QR kodunu tarayarak kuvöz penceresi kapaklarını açma/kapatma ve panelleri indirme/kaldırma ile ilgili 4 dakikalık kısa videoyu izleyin

gehealthcare.com

Hasta başı panelini veya kuvöz penceresini her kapattığınızda kuvöz penceresi kapaklarının mandallandığından emin olmak için **kuvöz penceresi kapağını** çekerek kontrol etmeniz gerekir.



Hasta başı panelini her kapattığınızda panelin mandallandığından emin olmak için paneli çekerek kontrol etmeniz gerekir.

Kırmızı tırnak, mandalın **yerine oturmadığını** gösterir.



MANDALLANMIŞ



MANDALLANMAMIŞ

Hasta başı panelini her kapattığınızda panelin mandallandığından emin olmak için paneli çekerek kontrol etmeniz gerekir.

Kırmızı tırnak, mandalın **yerine oturmadığını** gösterir.



MANDALLANMIŞ



MANDALLANMAMIŞ

¹ Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

² <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>