



ウォールは上/ドアは閉じること



新生児の保温と安全性を維持しましょう。

ウォールが下がっていたり、ドアが開いたままでベッドから離れないでください。



このQRコードをスキャンし、丸窓のドアの開閉とウォールの下降/上昇に関する短い5分間のビデオをご覧ください。

gehealthcare.com

ベッドサイドパネルまたは丸窓を閉じるたびに丸窓のドアを引っ張って、丸窓のドアのラッチが掛かっていることを確認する必要があります。



ラッチが掛かっている

ラッチが掛かっていない



ラッチが掛かっている



ラッチが掛かっていない

パネルを閉じるたびにベッドサイドパネルを引っ張って、ラッチが掛かっていることを確認する必要があります。

赤いタブは、ラッチが掛かっていないことを示します。

パネルを閉じるたびにベッドサイドパネルを引っ張って、ラッチが掛かっていることを確認する必要があります。

赤いタブは、ラッチが掛かっていないことを示します。



ラッチが掛かっている



ラッチが掛かっていない