

벽면 올리기/도어 닫기



영아를 따뜻하고
안전하게
보호하십시오

벽면을 내린
상태로 두거나
도어를 열어 두지
마세요



이 QR 코드를 스캔하여
포트홀 도어를 여닫는
방법과 벽면을 내리고/
올리는 방법에 관한 짧은
5분 분량의 동영상을
확인하십시오

gehealthcare.com

침상 패널 또는 포트홀을
닫을 때마다 매번 포트홀
도어를 닫겨 포트홀
도어에 래치가 걸려
있는지 반드시 확인해야
합니다.



래치 체결

래치 미체결



래치 체결



래치 미체결

패널을 닫을 때마다 매번
침상 패널을 닫겨 래치가
걸려 있는지 반드시
확인해야 합니다.

적색 탭은 래치가 걸리지
않았음을 나타냅니다.

패널을 닫을 때마다
매번 침상 패널을 닫겨
래치가 걸려 있는지
반드시 확인해야
합니다.

적색 탭은 래치가
걸리지 않았음을
나타냅니다.



래치 체결



래치 미체결