

Sieneles pakeltos / durys uždarytos



Padedą kūdikį laikyti šilčiau ir saugiai

Niekada nenuėikite į šalį, kai sienelė nuleista arba durys yra atviros



Nuskaitykite šį QR kodą ir peržiūrėkite trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kaip atidaromos ir uždaromos langelio durys ir nuleidžiamos / pakeliamos sienelės

gehealthcare.com

Privalote truktelėti **langelio duris** kiekvieną kartą, kai šoninis lovelės rėmas arba langelis uždaryti, kad įsitikintumėte, jog langelio durys yra užsklęstos.



UŽSKLĘSTAS

ATSKLĘSTAS



UŽSKLĘSTAS



ATSKLĘSTAS

Kiekvieną kartą uždare šoninį lovelės rėmą turite jį truktelėti, kad įsitikintumėte, jog jis yra užsklęstas.

Raudona kortelė parodo, kad sklęstis nėra užsklęstas.

Kiekvieną kartą uždare šoninį lovelės rėmą turite jį truktelėti, kad įsitikintumėte, jog jis yra užsklęstas.

Raudona kortelė parodo, kad sklęstis nėra užsklęstas.



UŽSKLĘSTAS



ATSKLĘSTAS