

# Ścianki podniesione / drzwiczki zamknięte



Zadbaj o ciepło i bezpieczeństwo dziecka.

Nigdy nie oddalaj się, jeśli ścianki są opuszczone albo drzwiczki są otwarte.



Aby obejrzeć krótki 5-minutowy film dotyczący otwierania i zamykania drzwiczek otworów pielęgnacyjnych oraz obniżania i podnoszenia ścianek, należy zeskanować kod QR.

[gehealthcare.com](http://gehealthcare.com)

Aby mieć pewność, że drzwiczki otworu pielęgnacyjnego są zablokowane, należy po każdym zamknięciu ścianki bocznej lub otworu pielęgnacyjnego pociągnąć za **drzwiczki otworu pielęgnacyjnego**.



ZABLOKOWANE

ODBLOKOWANE



ZABLOKOWANY



ODBLOKOWANY

Aby mieć pewność, że ścianka boczna jest zablokowana, należy pociągnąć za **ściankę** każdorazowo po jej zamknięciu.

Czerwony element wskazuje, że zatrzask **nie jest zablokowany**.

Aby mieć pewność, że ścianka boczna jest zablokowana, należy pociągnąć za **ściankę** każdorazowo po jej zamknięciu.

Czerwony element wskazuje, że zatrzask **nie jest zablokowany**.



ZABLOKOWANY



ODBLOKOWANY