

Ajude a manter o bebê aquecido e seguro

Nunca se afaste se houver uma parede abaixada ou uma porta aberta



Leia este QR code para assistir a um breve vídeo de 5 minutos sobre como abrir e fechar portinholas e abaixar/ levantar paredes

gehealthcare.com

estiver fechado para garantir que a portinhola esteja travada.





**TRAVADA** 



Você deve puxar o painel da cama <u>sempre</u> que o painel estiver fechado para certificar-se de que o painel está travado

A guia vermelha mostra que a trava não está engatada.

Você deve puxar o painel da cama sempre que o painel estiver fechado para certificar-se de que o painel está travado

A guia vermelha mostra que a trava não está engatada.



**TRAVADA** 



**DESTRAVADA**