

Table podignute / vratanca zatvorena



Pazite da bebi bude toplo i da je bezbedna

Nikada se ne udaljavajte dok je tabla spuštена ili dok su vratanca otvorena



Skenirajte ovaj QR kôd da biste odgledali kratak 5-minutni video o otvaranju i zatvaranju vratanca okana i spuštanju/podizanju tabli

gehealthcare.com

Kad god zatvarate tablu ležaja ili okno, obavezno povucite **vratanca okna** da biste proverili da li su **zabavljena**.



ZABRAVLJENO

NIJE ZABRAVLJENO



ZABRAVLJENO



NIJE ZABRAVLJENO

Kad god zatvarate **tablu ležaja**, obavezno je povucite da biste proverili da li je **zabavljena**.

Crveni jezičak označava da bravica **nije aktivirana**.

Kad god zatvarate **tablu ležaja**, obavezno je povucite da biste proverili da li je **zabavljena**.

Crveni jezičak označava da bravica **nije aktivirana**.



ZABRAVLJENO



NIJE ZABRAVLJENO