

# Paneller kaldırılmış/ kapaklar kapalı



Bebeğin sıcak bir ortamda kendini güvende hissetmesini sağlayın

Hiçbir zaman panel aşağıdayken veya kapak açıkken bebeği yalnız bırakmayın



Bu QR kodunu tarayarak kuvöz penceresi kapaklarını açma/kapatma ve panelleri indirme/kaldırma ile ilgili 5 dakikalık kısa videoyu izleyin

[gehealthcare.com](http://gehealthcare.com)

Hasta başı panelini veya kuvöz penceresini her kapattığınızda kuvöz penceresi kapaklarının mandallandığından emin olmak için **kuvöz penceresi kapağını** çekerek kontrol etmeniz gerekir.



MANDALLANMIŞ

MANDALLANMAMIŞ



MANDALLANMIŞ



MANDALLANMAMIŞ

Hasta başı panelini her kapattığınızda panelin mandallandığından emin olmak için paneli çekerek kontrol etmeniz gerekir.

Kırmızı tırnak, mandalın **yerine oturmediğini** gösterir.

Hasta başı panelini her kapattığınızda panelin mandallandığından emin olmak için paneli çekerek kontrol etmeniz gerekir.

Kırmızı tırnak, mandalın **yerine oturmediğini** gösterir.



MANDALLANMIŞ



MANDALLANMAMIŞ