

Vách ngăn đứng thẳng / cửa đóng



Giữ cho trẻ ấm áp và an toàn

Không bao giờ rời đi khi vách ngăn nằm ngang hoặc cửa mở



Quét mã QR này để xem video ngắn 5 phút về cách mở và đóng cửa thao tác cũng như nâng/hạ vách ngăn

gehealthcare.com

Bạn phải kéo thử **cửa thao tác** mỗi lần đóng vách ngăn lồng chụp hoặc cửa thao tác để đảm bảo đã khóa chốt cửa thao tác.



ĐÃ KHOÁ

CHƯA KHOÁ



ĐÃ KHOÁ



CHƯA KHOÁ

Bạn phải kéo thử **vách ngăn lồng chụp** mỗi lần đóng để đảm bảo đã khóa chốt vách ngăn.

Vách màu đỏ cho biết chốt **chưa khóa chặt**.

Bạn phải kéo thử **vách ngăn lồng chụp** mỗi lần đóng để đảm bảo đã khóa chốt vách ngăn.

Vách màu đỏ cho biết chốt **chưa khóa chặt**.



ĐÃ KHOÁ



CHƯA KHOÁ