

嵌板升高/门关闭



帮助保持婴儿暖和且安全

嵌板放下或门打开时，请勿走开



扫描这个二维码，观看一个关于打开和关闭操作孔门以及降低/升高嵌板的5分钟短视频

gehealthcare.com

每次关闭床旁嵌板或操作孔后，均须拉一拉操作孔门，以确保操作孔门已锁定。



已锁定

未锁定



已锁定



未锁定

每次关闭床旁嵌板后，均须拉一拉床旁嵌板，以确保嵌板已锁定。

看到红色凸舌表明锁销未接合。

每次关闭床旁嵌板后，均须拉一拉床旁嵌板，以确保嵌板已锁定。

看到红色凸舌表明锁销未接合。



已锁定



未锁定